

INSTRUKCJA UŻYCIA

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję użycia, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące prawidłowego stosowania produktu.

Wyrób medyczny **Vizik krople na podrażnione i zaczerwienione oczy** dostępny jest bez recepty.

Należy zachować instrukcję użycia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Vizik

wyrób medyczny



Krople na podrażnione i zaczerwienione oczy.

Nie zawierają konserwantów.

Krople do oczu zawierające dekspantenol i karbomer.

OPIS PRODUKTU:

Sterylnie krople do oczu **Vizik na podrażnione i zaczerwienione oczy** mogą być stosowane na przemęczone oczy, a zawarte w nich składniki zmniejszają zaczerwienienie oczu, szybko i na długo łagodząc objawy.

Vizik krople na podrażnione i zaczerwienione oczy nie zawierają konserwantów. Na powierzchni rogówki oka tworzą przezroczystą, lepką barierę ochronną. Zawierają prowitaminę B5 (dekspantenol), która dzięki wysokiej zdolności wiązania wody, nawilża i pielęgnuje oko. Prowitamina B5 wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki.

Właściwości nawilżające dekspantenolu są wspomagane przez drugi składnik – karbomer.

Karbomer działa osłaniająco na nabłonek rogówki, przeciwdziała podrażnieniu spojówki poprzez tworzenie bariery ochronnej, łagodząc podrażnienia związane z niedostatecznym wydzielaniem łez.

Vizik krople na podrażnione i zaczerwienione oczy nawilżają powierzchnię oka chroniąc ją przed długotrwałym dyskomfortem wywołanym przez:

- czynniki mechaniczne: np. powstałe podczas noszenia twardych lub miękkich soczewek kontaktowych lub podczas diagnostyki okulistycznej,
- drażniące czynniki środowiskowe: klimatyzację, wiatr, chłód, suchość lub powietrze zanieczyszczone np. dymem papierosowym.
- zmęczenie oczu spowodowane przez długotrwałe wyężanie wzroku, np. przy ekranie komputera, mikroskopem lub podczas długotrwałej eksploatacji pojazdów silnikowych.

Preparat **Vizik krople na podrażnione i zaczerwienione oczy** nie zawiera konserwantów, jest bardzo dobrze tolerowany nawet przy dłuższym stosowaniu. Krople do oczu **Vizik na podrażnione i zaczerwienione oczy** mogą być stosowane także przez osoby noszące soczewki kontaktowe. Podczas aplikacji nie jest konieczne ich zdejmowanie.

SPOSÓB UŻYCIA:


W celu otwarcia butelki z kroplami należy zdjąć pierścień zabezpieczający, pociągając za jego wystającą część, do całkowitego usunięcia (1). Następnie zdjąć korek pociągając go do góry (2). Odchylić nieco głowę do tyłu, spojrzeć w górę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę oka (3).

Trzymając butelkę otworem skierowanym do dołu, zakraplać 1 kroplę do worka spojówkowego 3-5 razy dziennie, poprzez mocne, dłuższe naciśnięcie (3+4). Powoli zamknąć oczy, aby umożliwić równomierne rozprzodzenie płynu na powierzchni oka.

Aby zachować sterylność preparatu należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z oczami lub dłońmi. Pozostającą na otworze kroplę należy usunąć przez lekkie stuknięcie w dno jeszcze przechylonej butelki. Zamknąć butelkę, lekko przyciskając nakrętkę do otworu (5).

Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub nastąpiło pogorszenie objawów, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.

(OSD) – Specjalny system sterylnych filtrów kroplomierza wymaga, aby każdorazowo po zakropleniu oka odczekać kilka sekund nie naciskając na butelkę, celem uniemożliwienia powrotu powietrza do jej wnętrza. Niewykonanie tej czynności może spowodować, że dalsze aplikacje kropli będą utrudnione, czyli konieczne będzie stosowanie coraz mocniejszego ucisku butelki w celu odmierzenia kolejnych kropli.

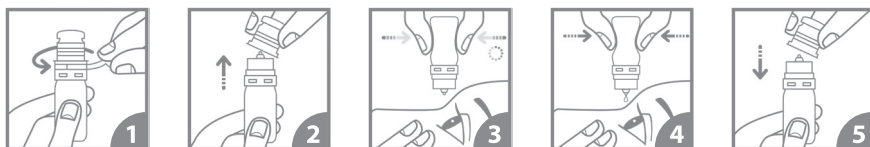

SKŁAD:

deksantanol, karbomer, bezwodny kwas cytrynowy, sorbitol, woda wysokoczyszczona

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

opakowanie jednostkowe: 1 x 10 ml

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Nie używać preparatu w przypadku pęknięcia pierścienia zabezpieczającego nakrętkę lub uszkodzenia butelki.
- Nie dotykać do oczu kroplomierzem.
- Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników.
- Jeśli stosujesz inne krople/maści do oczu, odczekaj około 15 minut. **Vizik krople na podrażnione i zaczerwienione oczy** należy zawsze stosować jako ostatnie.
- Nie stosować w przypadku infekcji lub uszkodzenia rogówki.
- Po aplikacji może wystąpić chwilowe rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn będących w ruchu, do czasu powrotu normalnego widzenia.
- Nie stosować kropli do oczu po upływie terminu ważności zamieszczonego na buteleczce i zewnętrznym opakowaniu.
- Ze względu na specjalny, innowacyjny system filtrów zakraplacza zawsze pozostaje w butelce minimalna ilość roztworu.
- Zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C. Chronić przed mrozem. Po użyciu każdorazowo zamknąć butelkę nakrętką. Chronić przed światłem, przechowując butelkę w oryginalnym opakowaniu.



Numer serii



Data ważności na opakowaniu i etykiecie butelki



Wyrób sterylny



Nie używać produktu w przypadku pęknięcia pierścienia zabezpieczającego nakrętkę lub uszkodzenia butelki.



Opis i sposób użytkowania znajdują się w załączonej instrukcji użycia



Temperatura przechowywania



Wytwórca:

Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551 Stulln, Niemcy

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki 04/2018

CE 0483

**Bitte beachten!**

Diese Daten dienen nur zur Abstimmung des Layouts. Farben sind im Ausdruck nicht farbverbindlich! Ebenso obliegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Code (EAN/PZN, Laetuscode, Sichtmarken, produktionsinterne Nummern etc.) nicht *Weber druck & mehr....*, eine finale technische Prüfung muss vom Kunden durchgeführt werden.

Name: Vizik	Land: Polen	Korrekturverlauf:
Objekt: Beileger	Version: 22.0559.03	1. Abzug: 26.05.2021 Fr. Gebhardt
Maße: 135x210	Laetus: 188	2. Abzug:
PMR-Nr:	Ptgröße: -	3. Abzug:
Farben: 4C		4. Abzug: