

35,00 mm

32,00 mm

wyrób
medyczny
Septinum
nos i zatoki

spray do nosa

wyrób medyczny
Septinum
nos i zatoki

**Infekcje
nosa i zatok**

30 ml

Skład:

Woda, polisorbát 20, gliceryna, pantenól, chlorek sodu, olejek eukaliptusowy, sorbinian potasu, hydroksypropyloceluloza, nanocząsteczki srebra, nanocząsteczki miedzi, kwas cytrynowy.

Sposób użycia:

Dorośli: aplikować kilka razy dziennie po 2-3 dozy do każdego otworu nosa. Przed użyciem wstrząsnąć. Ze względów higienicznych zaleca się używanie wyrobu przez jedną osobę. **Wyrób medyczny przeznaczony jest dla osób dorosłych.** Czas stosowania wyrobu medycznego **Septinum nos i zatoki** zależy od okresu utrzymywania się dolegliwości, jednakże nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować u dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego stosowania wyrobu medycznego **Septinum nos i zatoki** znajdują się w instrukcji użycia wewnątrz opakowania.

Miejsce i warunki przechowywania:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Zużyć w ciągu 4 tygodni od pierwszego otwarcia. Nie stosować wyrobu medycznego **Septinum nos i zatoki** po upływie terminu ważności.

5904966742309



+15°C +25°C



CE

xxxxxxx

wyrób
medyczny
Septinum
nos i zatoki

Wskazania:
Wspomaganie leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych nosa oraz zatok

Zastosowanie:

ochrona antybakteryjna nosa i zatok srebrem

ochrona przeciwgrzybicza błon śluzowych miedzią

oczyszczanie i regeneracja błon śluzowych

ułatwianie oddychania

**Wytwórca:**

Natur Produkt
Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
Polska



LOT

131,50 mm